



THERMOCARE

behaaglijk en veilige warmtebedjes
voor de allerkleinsten

THERMOCARE

De THERMOCARE productlijn is het resultaat van decennialange ervaring in warmtetherapie.

De ontwikkeling ervan is gefocust op de behoefte van de patienten en de gebruikers en is een kostenbewust alternatief wanneer baby's extra toezicht nodig hebben in de intermediate care afdeling. De THERMOCARE warmtebedjes zijn een ideaal en thermisch stabiele omgeving voor de kleine patiënt, en helpt in de ondersteuning van hun ontwikkeling.

Een modulair systeem, geschikt voor alle toepassingen:



THERMOCARE K

Verwarmd bed met onderverwarming, hoogte is vast of verstelbaar.



THERMOCARE C

Verwarmd bed met bovenverwarming, hoogte is vast of verstelbaar.



THERMOCARE KCE

Verwarmd bed met onder- en bovenverwarming, in hoogte verstelbaar.

Bijkomende accessoires:

Wand montage 170 mm of 250 mm hoog; Kap, eendelig of tweedelig.



Focus op de patiënt


Het bed biedt optimale werkomstandigheden voor de gebruiker. Het kan met één hand omhoog en omlaag gekanteld worden, waarbij de patiënt in het midden, onder de bovenverwarming, blijft liggen en niet wordt blootgesteld aan temperatuurwisselingen. De afstand naar aangesloten monitoren en apparaten is hierbij onveranderd.


Alle wanden kunnen voor een onbelemmerde toegang voor gebruikers en ouders met één hand omlaag geklapt worden.

Aanvullende veiligheidswanden voorkomen dat het kind tijdens een onbewaakt moment naar beneden kan vallen. Tijdens de behandeling kunnen de veiligheidswanden volledig in het bed worden geschoven.

Benodigd materiaal altijd bij de hand

Tijdens de behandeling is het belangrijk om altijd de benodigde materialen bij de hand te hebben. De laden van het verwarmde bed kunnen op zo'n manier worden geopend dat ze vanuit elke positie en in iedere situatie toegankelijk zijn.

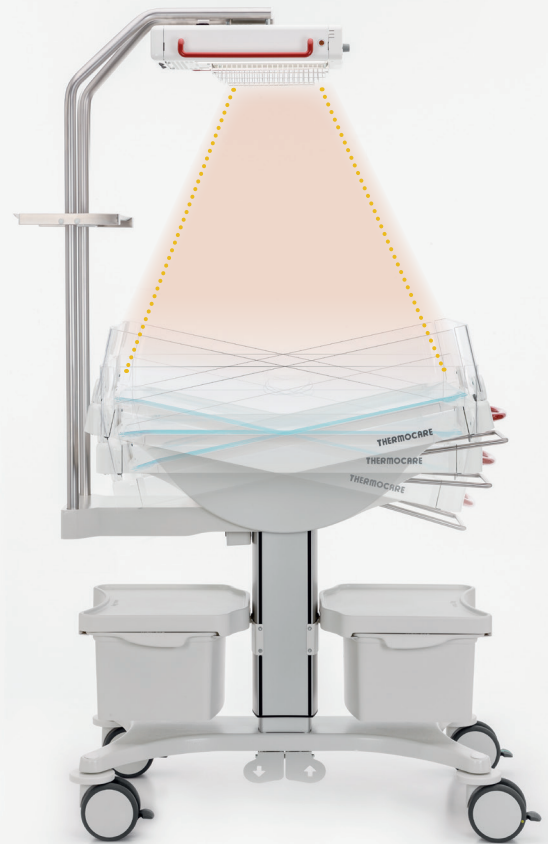

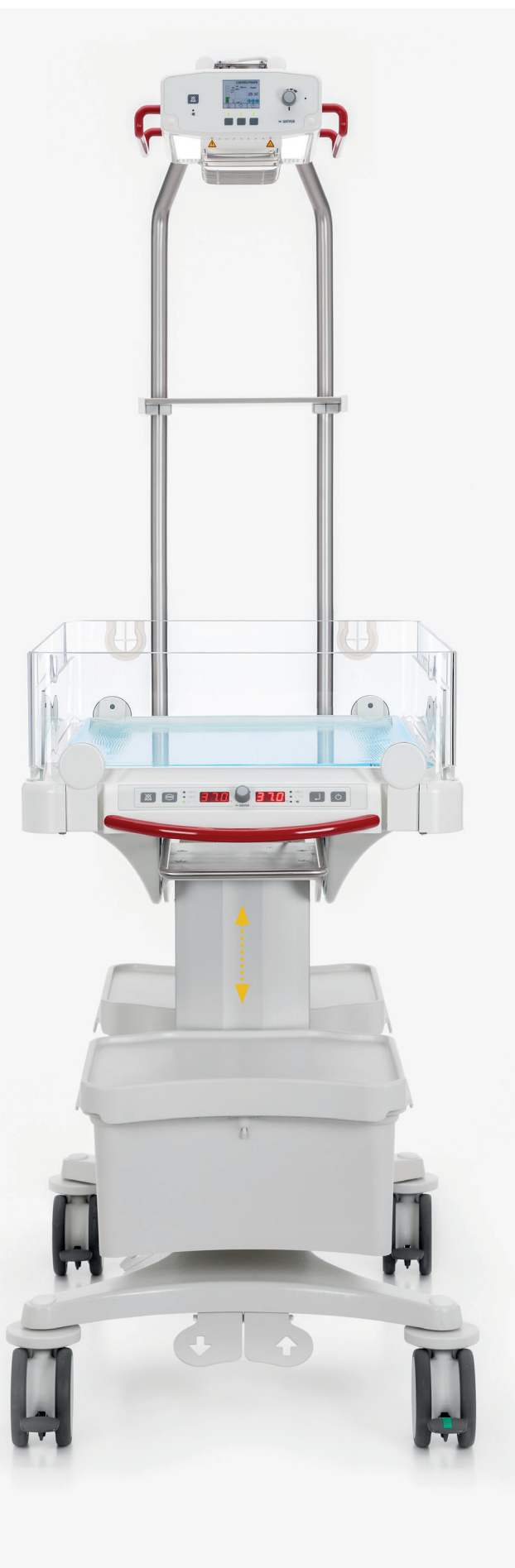

Verantwoorde, comfortabele bovenverwarming

Afhankelijk van het model zijn de THERMOCARE verwarmde bedden voorzien van een bovenverwarming. De lange golf infrarode verwarming is niet zichtbaar, erg zacht en de patiënt voelt zich comfortabel en warm.

Actief verwarmd gelkussen

Afhankelijk van de configuratie is er een actief verwarmd gelkussen dat de stabilisatie van de lichaamstemperatuur ondersteunt. Het grote volume van opgebouwde warmte in het gelkussen biedt de perfecte thermische balans voor de baby en ondersteunt snelle verwarming van onderkoelde patiënten.

Door het zachte en warme gelkussen herinnert de baby zich het contact met de huid van de ouders en wordt kalm en tevreden. Een ontspannen baby creëert een positieve sfeer voor ouders en verplegend personeel.

Het zachte oppervlak van het gelkussen voorkomt doorligwonden (decubitus), wat het positieve gevoel compleet maakt.

Stralingswarmte plus verwarmd gelkussen


De combinatie van lange golf infrarode verwarming en de geleidende warmte van het gelkussen is de ideale situatie voor een thermisch neutrale omgeving in de open zorg.

Zachte aanpassing van de hoogte door de soft lift

De hoogte van het bed kan soepel aangepast worden met voetpedalen. De baby zal niet schrikken door de beweging en voelt zich comfortabel.

Altijd geschikte verlichting


Voor de kleinste patiëntjes is alleen het beste licht goed genoeg. Zuigelingen, in het bijzonder pasgeboren baby's, raken gestrest als ze plotseling worden verblind door een felle lichtspot. Daarom gaan de groot oppervlak lampen van de bovenverwarming CERAMOTHERM® geleidelijk aan en uit. De kleine patiëntjes blijven kalm en voelen zich comfortabel. De lichtsterkte kan in 5 stappen worden aangepast aan de huidige situatie. Op die manier is optimaal licht altijd beschikbaar, dag en nacht.

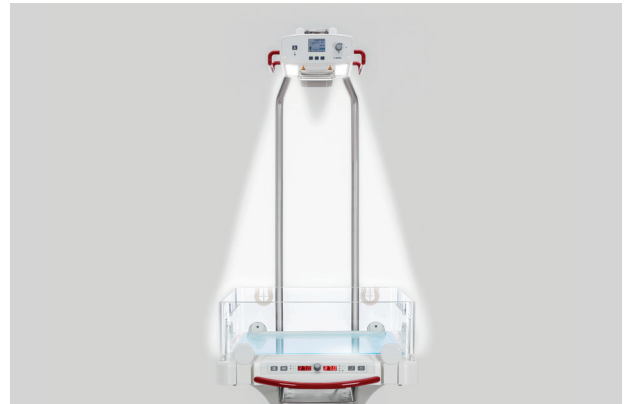

Geïntegreerde timers

Er zijn drie timers in de bovenverwarming geïntegreerd zodat het THERMOCARE verwarmde bed voor diverse toepassingen gebruikt kan worden.

- Apgar timer voor postnatale zorg of pasgeboren baby's
- Stopwatch, bij vele toepassingen nuttig
- Aftel timer, altijd onmisbaar bij toepassingen met een beperkt tijdsbestek.

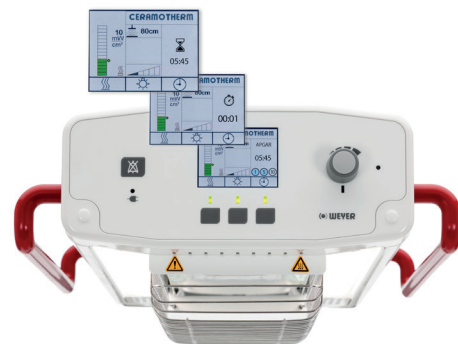

Verandering van de locatie is geen probleem

Soepele en stevige dubbele wielen zorgen voor een stabiele opstelling van het THERMOCARE verwarmde bed, en ze maken eenvoudige verplaatsing mogelijk. Een van de wielen heeft een stuurslot voor een perfecte richtingsstabiliteit, dit maakt het manoeuvreren om hoeken en meubilair makkelijker. Vier bumpers beschermen het verwarmde bed, de omgeving en meubels tegen beschadigingen.



Geïntegreerde veiligheid


De THERMOCARE verwarmde bedden zijn gebruikersvriendelijk en volgens het principe van geïntegreerde veiligheid ontworpen.

De holle vorm van de behandeltafel en de veiligheidswanden voorkomen dat de patiënt naar beneden kan vallen.

Als het gelkussen beschadigd raakt, is er geen lek of vloeistof.

De gesloten stalen veiligheidsafdekking van de bovenverwarming voorkomt dat het hete verwarmingselement aangeraakt kan worden.

De geselecteerde temperatuurs- en stralingsinstellingen kunnen niet onbedoeld worden veranderd.

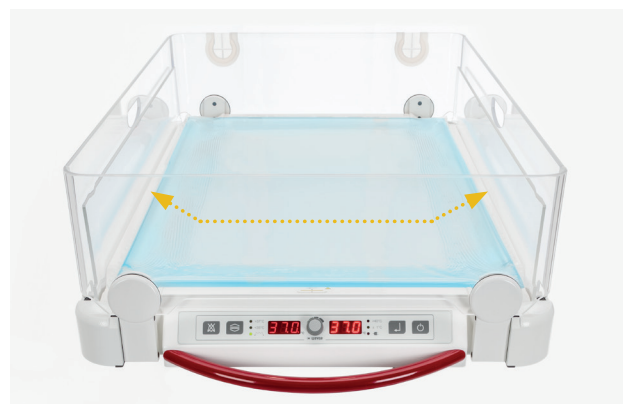

THERMOCARE

Hoge kwaliteitsstandaard

THERMOCARE apparaten worden volgens de huidige veiligheids- en kwaliteitsstandaarden in Duitsland ontwikkeld en geproduceerd.

Het gebruik van hoogwaardig materiaal en het solide vakmanschap garanderen een lang leven van de verwarmde bedden.

Systeem synergieën

WEYER apparaten vormen samen een unieke productlijn, waarvan de componenten en elementen verenigbaar zijn. Dit zijn onder andere:




Beademing en zuiging
REANIMAT®-O2-Blend



Bovenverwarming
CERAMOTHERM®



LED-fototherapie apparaat
BILICOMPACT® LED

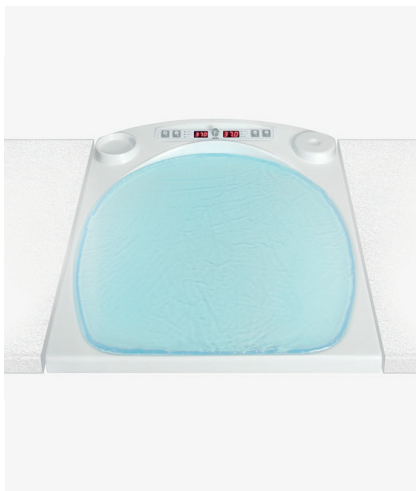

**Onder verwarmingsapparaat,
tafelmodel**
THERMOCARE Convenience



Zuigelingen reanimatietafel
VARIOTHERM®



Couveuse
THERMOCARE Vita

CONFIGURATIE

- standaard configuratie
- ▲ essentieel voor gebruik
- accessoire

Alle THERMOCARE apparaten zijn uitgerust met:

4 soepele dubbele wielen, 3 met volledige vergrendeling, 1 met stuurslot, bed 480 x 760 mm met verhoogde zijwanden, hoofd- en voeteneinde verstelbaar tot $\pm 12^\circ$, 3-stopcontacten van 230 V voor extra apparaten.

Configuratie van het basisapparaat	Bestelnr.	THERMOCARE K met onderverwarming		THERMOCARE C met warmtestraler		THERMOCARE KCE met onderverwarming en warmtestraler
		Vaste hoogte	Hoogte verstelbaar	Vaste hoogte	Hoogte verstelbaar	Hoogte verstelbaar
Onderverwarming met gelkussen		□	□	—	—	□
Soft lift hoogteverstelling, hoogte van het bed 850- 1150 mm		—	□	—	□	□
Buissamenstelsel voor toevoegen van een warmtestraler en accessoires		—	—	□	□	□
Warmtestraler CERAMOTHERM®		—	—	□	□	□

Wandsamenstelling - WY3021 of WY3022 moet verplicht bij het basisapparaat worden besteld

Wandsamenstelling 170 mm hoog, neerklapbaar, 2 veiligheidswanden	WY3022	▲	▲	▲	▲	▲
Wand samenstelling 250 mm hoog, neerklapbaar, 2 veiligheidswanden	WY3021	▲	▲	▲	▲	▲
Eendelige kap voor wand samenstelling 250 mm hoog (WY3021)	WY3024	●	●	●	●	●
Tweedelige kap voor wand samenstelling 250 mm hoog (WY3021)	WY3025	●	●	●	●	●


Extra onderdelen

Plank bevestigd aan de pilaar, max. 4 planken per apparaat	WY3035	●	●	●	●	●
Boogvormige laden uitschuifbaar aan beide zijden, bevestigd aan plank WY3035, max. 2 laden per apparaat	WY3036	●	●	●	●	●
Aanvullend paar voetpedalen voor hoogteverstelling	WY3032	—	●	—	●	●
Ondersteuning voor aanpassing 2 buizen 27 mm	WY3051	●	●	—	—	—
Buissamenstelsel Ø 27 mm, lengte 650 mm voor toevoegen accessoires	WY3055	●	●	—	—	—
Plank 590 x 320 mm, bevestigd aan de buizen Ø 27 mm en Ø 40 mm, met instrumentenrail en bevestiging voor het hemeltje.	WY3060	●	●	●	●	●
Plank 240 x 300 mm, bevestigd aan buissamenstelsel Ø 27 mm, met twee instrumentenrails en bevestiging voor het hemeltje.	WY3061	●	●	●	●	●
Instrumentenrail bevestigd aan buissamenstelsel Ø 27 mm	WY3064	●	●	●	●	●
Infuushouder, hoogte verstelbaar, bevestigd aan buissamenstelsel Ø 27 mm	WY2076	●	●	●	●	●
Hemel voor bed, aangesloten op WY3055	WY3070	●	●	—	—	—
Houder voor beademingsslangen, bevestigd in de hoek van het bedje.	WY3075	●	●	●	●	●



TECHNISCHE GEGEVENS

		THERMOCARE K Vaste hoogte, met onderverwarming	THERMOCARE K Verstelbare hoogte, met onderverwarming	THERMOCARE C Vaste hoogte, met bovenverwarming	THERMOCARE C Verstelbare hoogte, met bovenverwarming	THERMOCARE KCE Verstelbare hoogte, met boven- en onderverwarming
Elektrische parameters	Onderverwarming	180 W	180 W	–	–	180 W
	Soft lift zuil	–	120 W	–	120 W	120 W
	Bovenverwarming CERAMOTHERM®	–	–	690 W	690 W	690 W
	Start stopcontacten voor accessoires	3	3	3	3	2
	Max. stroomingang	2300 W				
	Voltage	230 V / 50 - 60 Hz				
Operationele parameters	Hoofd- en voeteneinde verstelbaar tot	± 12°				
	Kussen	PU gel		PU-schuim		PU gel
	Selectiebereik van de onderverwarming: standaard 35,0 – 37,0 °C, uitgebreid 30,0 – 38,5 °C	Ja	Ja	–	–	Ja
	Verlichting	–	–	LED 2 x 850 lm, dimbaar		
	Kleurtemperatuur van het licht	–	–	4000 K		
	Verwarmingselement van de bovenverwarming/ golflengte	–	–	Keramisch / 1,5 – 6,8 µm		
	Selectie van de bestralingssterkte	–	–	2 – 20 mW/cm²		
	Functie "automatische intensiteit reductie"	–	–	Ja		
	Vertoning van geselecteerde, werkelijke waarde en restwarmte	Ja				
	Gewicht van het apparaat	66 kg	72 kg	73 kg	79 kg	80 kg
Classificatie volgens richtlijn 93/42/EEC		II a		II a		II b

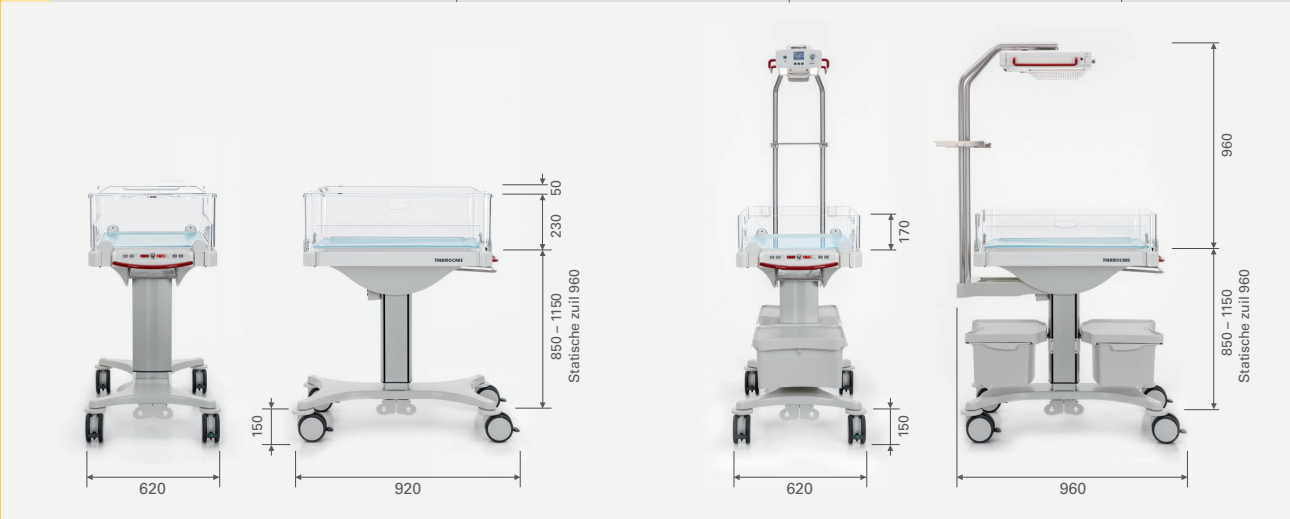

Weyer GmbH
Herrenhöhe 4, D-51515 Kürten-Herweg
Tel.: +49 (0)2207 9698-0
Fax.: +49 (0)2207 4750
E-Mail: info@weyermed.com
www.weyermed.com

Import en distributie uitsluitend via:



JRM Medical
Tel: +31 (0)181 419393
www.jrmmedical.nl

